

オオサキ ホットパック



上:ホットパック-C
下:ホットパック-L

ホットパック-C (頸部用・菱形)

ホットパック-L (腰部用・長方形)


適用部位全体を均一に暖めることのできるホットパックで、繰り返し使用が可能な製品です。
加温槽で70～80℃に保ったお湯に本品を沈め、15～20分程温めてから使用してください。

保温性に優れた蓄熱材を使用し、適用部全体を温めることができるよう、蓄熱材が均一になる形状に設計されています。

ホットパック-Cは頸部に当てやすい菱形、ホットパック-Lは腰部に適した長方形です。
適用部位に合わせてお使いください。


ヒルドパック-C(頸部用)

大きさ 縦185mm×横430mmのひし形

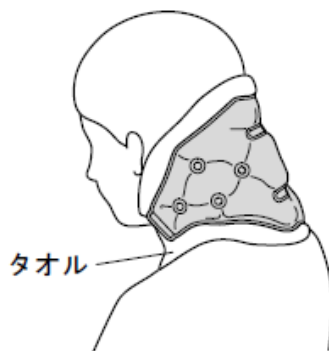

ヒルドパック-L(腰部用)

大きさ 縦265mm×横430mm

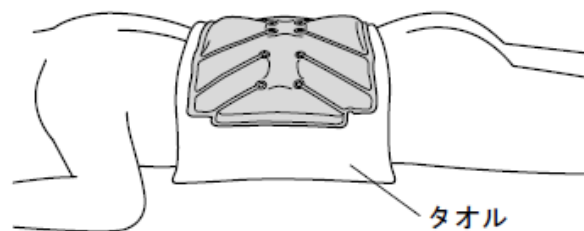

⚠ 背中、腰等の下に敷いて使用しないでください。
(蓄熱剤が漏れ出しやけどをするおそれがあります)

品名	寸法規格	入数	標準価格
ホットパック-C (頸部用)	185mm×430mm 菱形	10枚入	OPEN
ホットパック-L (腰部用)	265mm×430mm 長方形	5枚入	OPEN

※ ヒルドパックN・ヒルドパックWはメーカー製造終了品となりました。

今後は、Nの後継品としてホットパック-Cを、

Wの後継品としてホットパック-Lをご使用ください。

形状寸法および使用法は同じで、繰り返し耐久性が向上しております。